
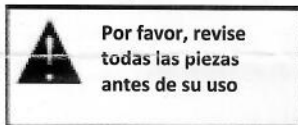


## ANDADOR CON FRENO RI-IM-CR04

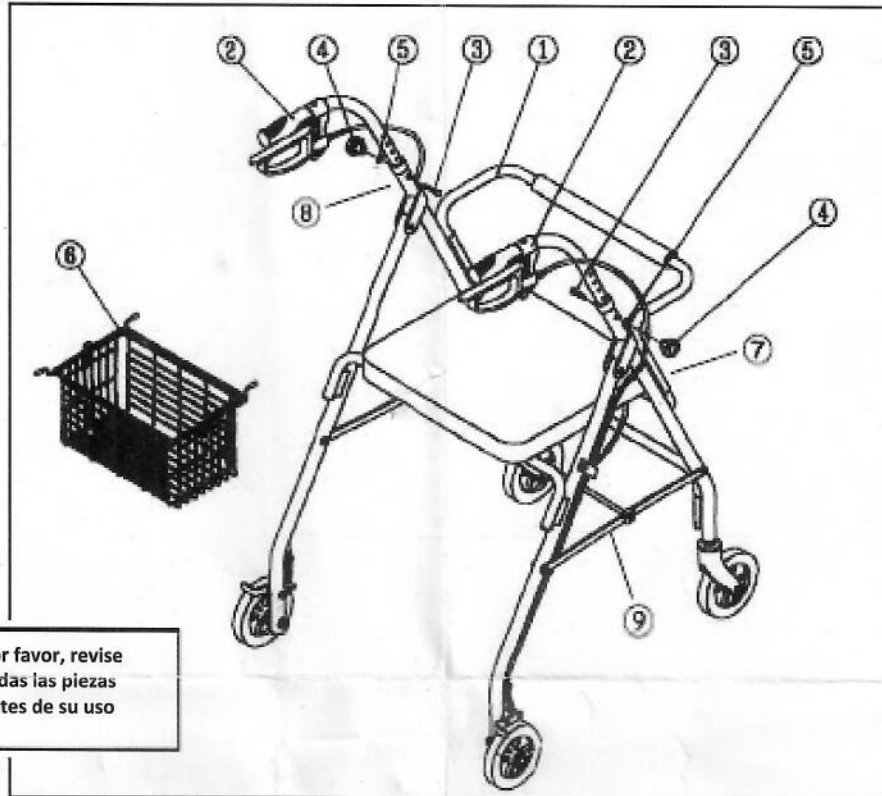

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Inserte el tubo del respaldo ( 1 ) en los chasis de los asientos delanteros ( 7 ) hasta que los botones cierren a presión.
2. Inserte el tubo de los puños ( 2 ) en el interior del chasis ( 8 )

**NO AJUSTE** altura del mango más allá de las marcas de seguridad

3. Inserte el tornillo ( 3 ), la tuerca ( 4 ) y la arandela ( 5 ) a través de los agujeros en los tubos y apriete; periódicamente comprobar que los tornillos están apretados antes de su uso.
4. Levante el asiento. Coloque la canasta debajo del asiento entre las barras transversales, a continuación, cierre el asiento.
5. Tenga la abrazadera de seguridad ( 9 ) presionada hacia abajo, si no, el andador podría plegar durante el uso.

### INSTRUCCIONES DE USO

Este producto proporciona apoyo a Personas con movilidad reducida mientras camina.

Asegúrese de apretar el freno en posición de bloqueo (hacia abajo) antes de sentarse en el asiento. Tire del freno para liberar el bloqueo. Para aplicar el freno mientras se camina, tire hacia arriba similar a un freno de bicicleta.

### INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO

Limpie el chasis con un paño suave y limpio, al menos una vez a la semana. Si el andador se expone a la humedad, séquelo inmediatamente. De lo contrario, las partes metálicas se deben pulir una vez al mes con una cera de auto.



Peso máximo usuario



Fabricado por:  
IM-ORTOMOBILITY, S.L.  
C/ San Pedro, 5 · 08291 RIPOLLET ( Barcelona )